



# CurcuDerma®

**Dispositivo Medico di classe I – tubo da 50 ml/75 ml**  
(ai sensi della Direttiva 93/42/CEE aggiornata con la Direttiva 2007/47/CE)

**COMPOSIZIONE:** Aqua [Water], Cyclodextrin [Cyclodextrin], Curcuma longa extract [Curcuma longa (Turmeric) leaf extract], Hydroxypropyl methylcellulose [Hydroxypropyl methylcellulose], Carbomer [Carbomer], Triethanolamine [Triethanolamine], Tocopherol [Tocopherol], Potassium sorbate [Potassium sorbate].

**PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:** Il dispositivo si presenta in forma di gel per uso esterno, indicato per la protezione delle pelli sensibili irritate, grazie alla sua azione filmogena ed antiossidante. La sua particolare colorazione “gialla” permette, anche all’utente non addestrato, di verificarne la corretta applicazione sulla zona interessata.

**ATTIVITÀ E PROPRIETÀ DEL FORMULATO:** Grazie alla spiccata azione antiossidante degli estratti di Curcuma, è in grado di fungere da barriera contro fattori aggressivi esterni (radicali liberi, detergenti, ecc). Inoltre, le sostanze filmogene contenute nella formulazione formano sulla pelle una pellicola impermeabile che impedisce all’acqua, contenuta nella nostra cute, di evaporare rafforzando così la barriera cutanea e mantenendo la pelle ben idratata.

**INDICAZIONI:** Il prodotto è indicato per la protezione delle pelli sensibili o irritate, grazie alla sua azione filmogena ed antiossidante. La formulazione in gel è di facile applicazione e di utilizzo grazie alla spiccata colorazione che ne rende ben visibile la zona di applicazione. La spiccata azione antiossidante degli estratti di Curcuma, è in grado infatti di fungere da barriera contro fattori aggressivi esterni (radicali liberi, detergenti, ecc). Inoltre, le sostanze filmogene, contenute nella formulazione, formano sulla pelle una pellicola impermeabile che impedisce all’acqua contenuta nella nostra cute di evaporare rafforzando così la barriera cutanea e mantenendo la pelle ben idratata.

**MODO D’USO:** Lavare bene le mani prima dell’uso. Prima dell’applicazione la cute deve essere pulita e asciutta. Applicare una quantità di prodotto sufficiente sulla zona interessata, di solito dai 10 ai 40 mg circa e massaggiare delicatamente in modo uniforme fino a completo assorbimento. Non superare le tre applicazioni giornaliere e a distanza di 4/6 ore.

**TOLLERABILITÀ E COMPATIBILITÀ:** Se utilizzato correttamente, il quantitativo di prodotto a contatto con la cute è nettamente al di sotto dei limiti di tollerabilità e compatibilità.

**AVVERTENZE:** Uso esterno. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano dagli occhi e non utilizzare nella zona perioculare. Non utilizzare in caso di allergia o ipersensibilità verso uno o più componenti. Il prodotto impartisce una temporanea colorazione “gialla” alla pelle, che può essere rimossa tramite ripetuti lavaggi con acqua tiepida; eventuali macchie su indumenti possono essere rimosse tramite semplice lavaggio. A scopo precauzionale, le donne in gravidanza e che allattano al seno dovrebbero chiedere il parere del medico prima di utilizzare il prodotto stesso. Non impiegare su cute lesa.

**MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:** Chiudere bene il tubo dopo ogni utilizzo. Conservare il prodotto ben chiuso in ambiente al di sotto dei 25 gradi e al riparo dalla luce diretta, in luoghi non accessibili ai bambini.

**PERIODO DI VALIDITÀ:** Il periodo di validità (3 anni) si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata o dopo la data di scadenza indicata.

#### **NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE:**

Fabbricante: ItaMed srl – Via Paolo Mantegazza, 47 19125 La Spezia (SP)  
Produttore: Antipoli Research srl via Cravero, 17/2A 10088 Volpiano (TO)

**DATA DI COMPILAZIONE:** 25.01.2021

BULGARDINO



Verifica le disposizioni del tuo Comune

Senza profumo.



Formula esclusiva e commercializzato da

## ItaMed

Professional body & health care

Via Paolo Mantegazza, 47 - 19125 La Spezia (SP)  
Tel. +39 0187 1856381 - Cell./WhatsApp +39 391 767 1067  
info@itamed.eu - www.itamed.eu